




CARDIOMEMS™

ELEKTRONISCH SYSTEEM VOOR DE PATIËNT

SNELSTARTGIDS



ONDERDELEN

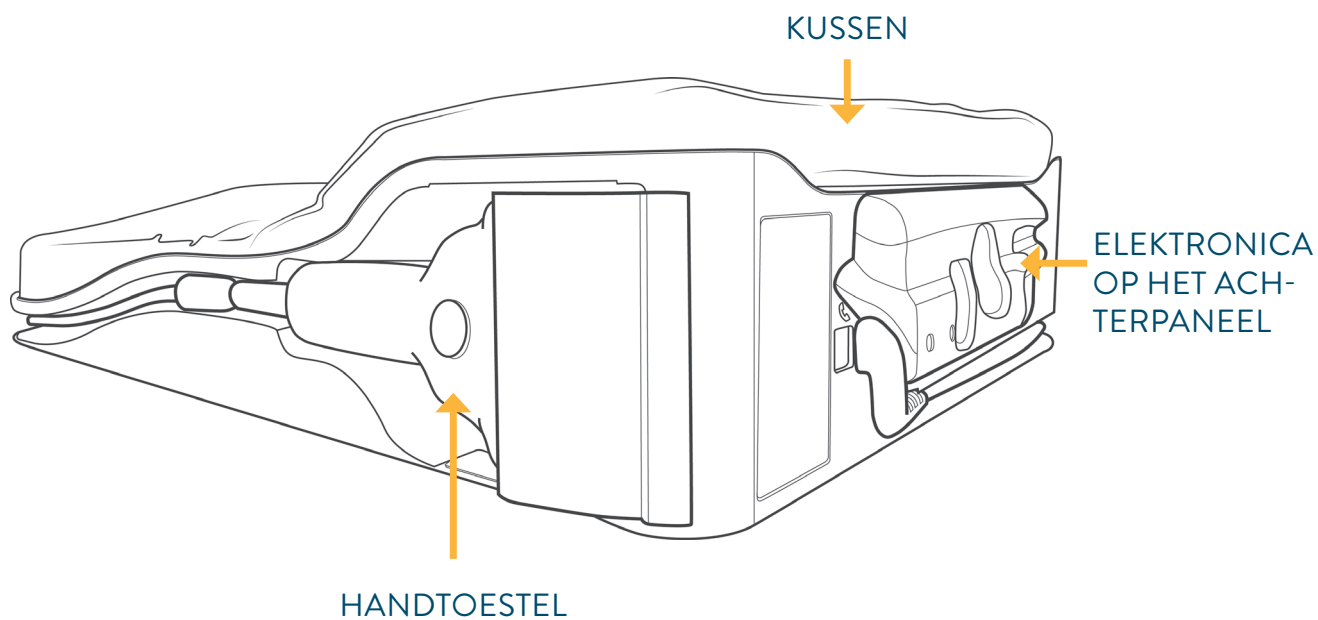


Telefoonsplitter




U krijgt mogelijk een telefoonsplitter als uw mobiele signaal thuis slecht is.


Voedingsadapter

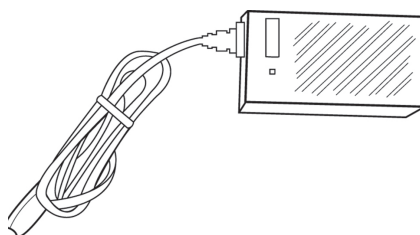

Telefoonkabel

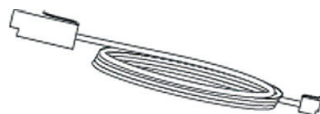

Voedingskabel

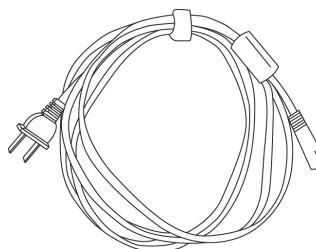


WiFi™-adapter

U krijgt mogelijk een WiFi-adapter als uw mobiele signaal thuis slecht is.



Netsnoerklem

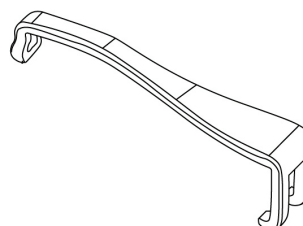


INSTELLING VAN HET ELEKTRONISCH SYSTEEM VOOR DE PATIËNT

Het elektronisch systeem voor de patiënt bestaat uit de elektronische eenheid met ontvangstantenne (in het kussen) en een handtoestel.


1

Steek de stroomkabel in de voedingsadapter.

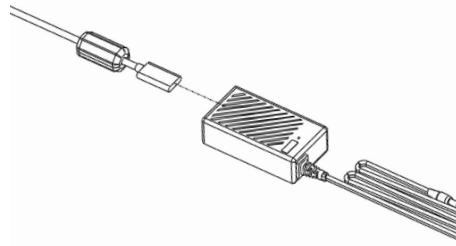

2


Bevestig de meegeleverde netsnoerklem aan de voedingsadapter. Dit zorgt ervoor dat de kabels niet van elkaar worden gescheiden wanneer de eenheid in en uit positie wordt verplaatst.

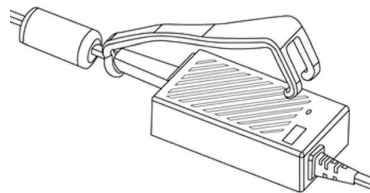

3


Steek de voedingsadapterkabel in de stekker van de voedingsconnector zodat deze volledig zijn verbonden.

Druk de aangesloten stekkers stevig in de gegoten groef op de achterkant van de elektronische eenheid.

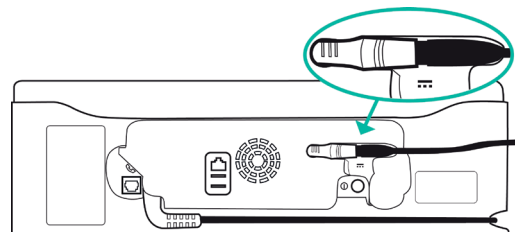


4

Steek het andere uiteinde van de voedingskabel in het wandstopcontact.

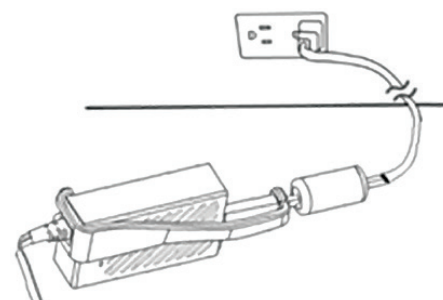

5

Druk op de doorzichtige aan/uit-knop op de achterkant van de elektronische eenheid om deze in te schakelen. De knop gaat blauw branden.

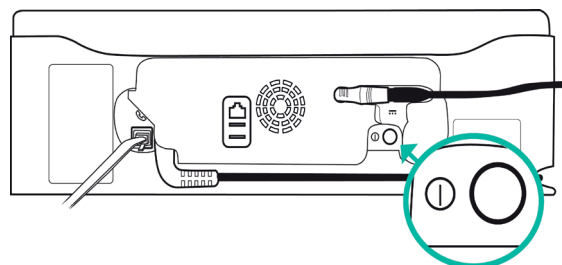

VERBINDINGSMETHODEN (WiFi™ EN TELEFOON)


De elektronische eenheid is uitgerust met een vooraf geïnstalleerde mobiele USB-adapter. Als u geen mobiel bereik hebt in uw regio, kunt u gebruikmaken van WiFi™ of een vaste telefoonlijn. Raadpleeg onderstaande pagina's voor verdere informatie.

WiFi™

1

Als de elektrische eenheid is uitgeschakeld, steekt u de WiFi™-adapter in een van de USB-poorten op de achterkant van de eenheid.

OPMERKING: als er een draadloze adapter en een WiFi-adaptor op uw eenheid zijn aangesloten, probeert de eenheid om eerst verbinding te maken met WiFi.

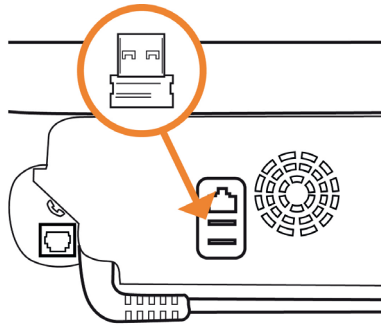

2

Zodra het apparaat is ingeschakeld, wordt het WiFi-installatiescherm weergegeven. Selecteer de knop Configureren om te starten.



3

Selecteer de knop Netwerk om het WiFi-netwerk in uw huis te vinden.




4

Als uw WiFi-thuisnetwerk niet boven aan de lijst staat, drukt u op de knop Volgende totdat het netwerk naar boven wordt verplaatst en drukt u op de knop Selecteren.



5

U wordt gevraagd uw netwerkwachtwoord in te voeren en vervolgens de knop Enter te selecteren.

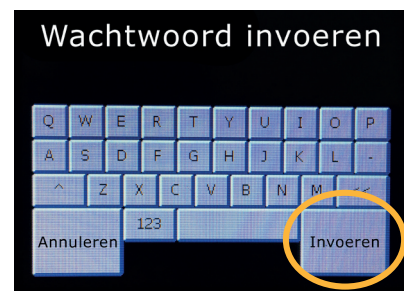

6

Op het WiFi-verbindingsscherm wordt weergegeven dat de verbinding met uw thuisnetwerk is gemaakt. Selecteer de knop Opties om door te gaan.




VERBINDINGSMETHODEN (WiFi™ EN TELEFOON)


VASTE TELEFOONLIJN

OPMERKING: als uw eenheid is verbonden met WiFi en u deze wilt aansluiten op een vaste telefoonlijn, verwijdt u de WiFi-adap-ter uit de USB-poort.

- 1** Til het kussen van de hoofdsteen om de USB-kamer vrij te maken.

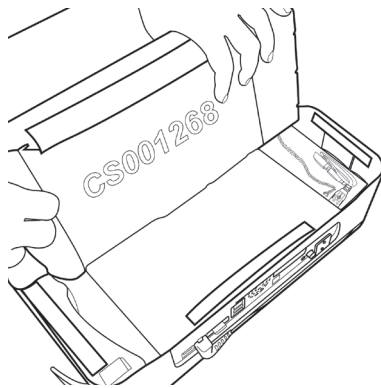


- 2** Haal de USB-kabel uit de USB-poort. Laat de mobiele adapter met de kabel in de USB-kamer. Laat de kabels gedraaid, omdat anders de elektromagnetische emissies kunnen worden beïnvloed.

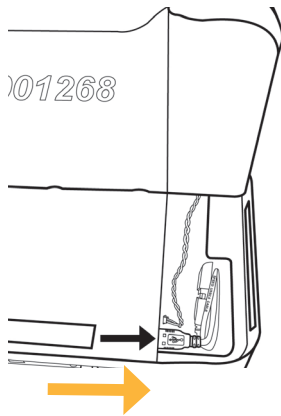

- 3** Leg het kussen terug in de oorspronkelijke positie.

- 4** Als u een WiFi-adapter hebt aangesloten op een USB-poort op de achterkant, verwijdt u deze en bergt u deze op een veilige plaats op.

- 5** Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de achterkant van de elektronische eenheid en steek het andere uiteinde in een telefoonaansluiting in de muur. 'De mogelijke meegeleverde telefoonsplitter kan worden gebruikt als er al een telefoonlijn is aangesloten op de telefoonaansluiting.

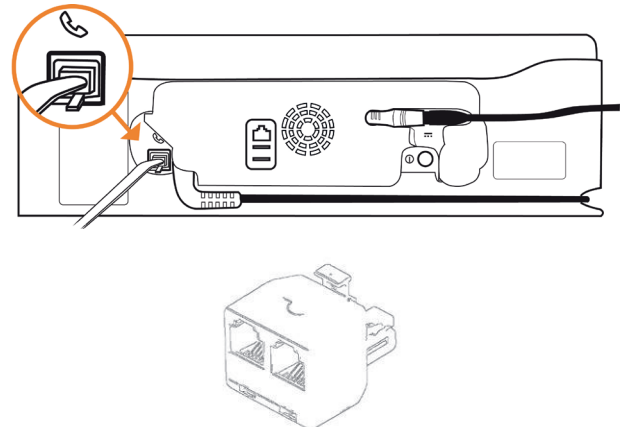

EEN UITLEZING UITVOEREN


1

Plaats de elektronische eenheid op een oppervlak waar u comfortabel dagelijks kunt uitlezen.

OPMERKING: zorg ervoor dat dit oppervlak vrij is van voorwerpen die het sensorsignaal kunnen verstoren, zoals een elektrische warmtedeken. Zie 7B voor een lijst met items die meestal storingen veroorzaken.

2

Druk op de doorzichtige aan/uit-knop op de achterkant van de elektronische eenheid om deze in te schakelen. De knop gaat blauw branden.

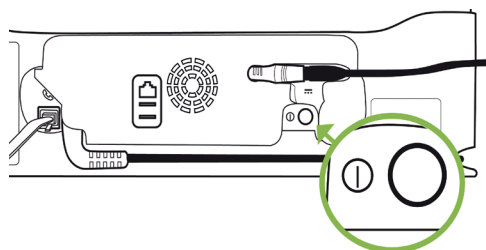

3


Verwijder het handtoestel uit het opbergvak aan de zijkant van het kussen, wikkel de kabel volledig af uit de gleuf en leg uw hoofd op het dikste gedeelte van het kussen.



4

Schuif iets naar links of rechts, zodat de sensor over het onderste deel van het kussen is gecentreerd. Hier bevindt zich de antenne.

OPMERKING: houd er rekening mee dat de sensor zich vlak voor uw rechter- of linkerschouderblad bevindt. Als u niet weet aan welke kant uw sensor zich bevindt, neemt u contact op met uw zorgverlener. U kunt ook over het kussen schuiven totdat er een sterk signaal tussen de antenne en uw sensor wordt opgevangen.

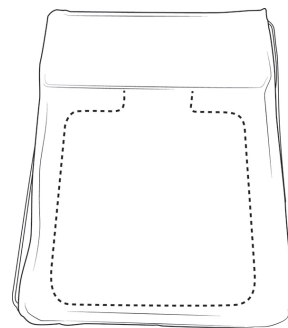

5

Druk als u er klaar voor bent op de ronde groene knop onder het aanraakscherm op het handtoestel om het uitlezen te starten.

Opmerking: leg het handtoestel niet rechtstreeks op uw borstkas tijdens een uitlezing.



EEN UITLEZING UITVOEREN

6

Blijf stil liggen. Het systeem leidt u met gesproken aanwijzingen.



7

Als uw lichaamspositie goed is, hoort u: Goede positie op het kussen. Niet bewegen.

A. Als u 'Verschuif een beetje op het kussen' hoort, verandert u uw lichaamspositie door kleine bewegingen te maken richting de schouder tegenover de plaats waar de sensor zich bevindt.

B. Zorg er verder voor dat er zich geen metalen voorwerpen in de buurt van u of de elektronische eenheid bevinden. Denk hierbij aan sieraden, sleutels, riemen, elektrische warmtedeken, metalen bedframes of -rails of andere medische apparatuur zoals een CPAP-apparaat, oplader voor gehoorapparaten of zuurstoftoevoer.



8


Nadat het bericht Meten is verschenen, dient u stil te blijven liggen terwijl de muziek klinkt.



9

Wanneer de lezing is voltooid, hoort u 'Meting voltooid. U mag opstaan.' Het systeem wordt uitgeschakeld nadat de meting is verzonden.


OPMERKING: druk niet op de aan/uit-knop en koppel de eenheid niet los.

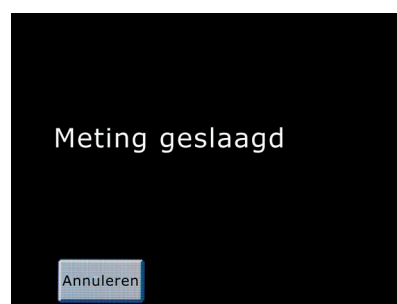

VEELGESTELDE VRAGEN


Hoe wijzig ik het volume op de eenheid?

Nadat de eenheid is ingesteld en ingeschakeld, klikt u op de knop Opties in het startscherm. Selecteer de knop Volume en druk vervolgens op de knop omhoog of omlaag om het volume te verhogen of te verlagen.

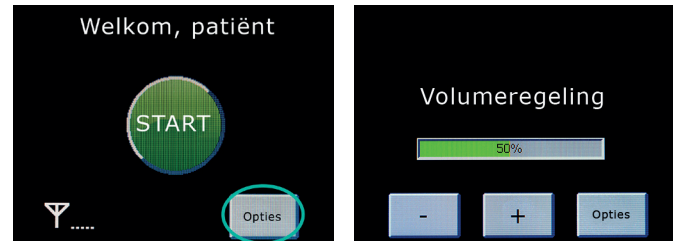

Telkens wanneer ik op het kussen lig, hoor ik een bericht dat ik van positie moet veranderen. Hoe kan ik dit voorkomen?

Het systeem bevat een positioneringsbal die op het kussen kan worden geplaatst, zodat u de beste positie voor het uitlezen van uw sensor kunt onthouden. Als u zich die positie niet meer kunt herinneren, gebruikt u de bal om de juiste plek te markeren. Mensen plaatsen de bal vaak op het punt waar de nek tegen de schouder ligt aan de kant waar de sensor zich bevindt.

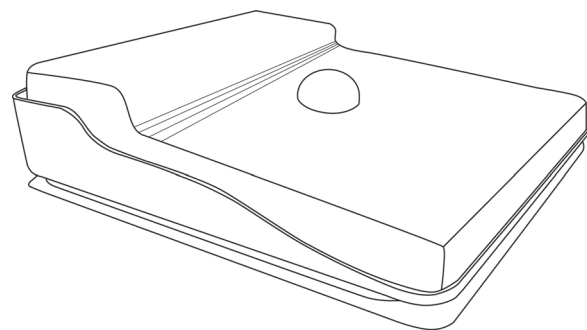


Wat betekent de kleur van de signaalsterktebalk?

Een groene signaalsterktebalk geeft aan dat er een sterke verbinding met uw sensor is en dat de eenheid een meting doet. De minimaal vereiste signaalsterkte voor het uitvoeren van een meting is een continue waarde van 70% of hoger.

Een witte signaalsterktebalk geeft aan dat er geen sterke verbinding is met uw sensor. Probeer iets over het kussen te schuiven en zorg ervoor dat er zich geen metalen voorwerpen in het gebied rondom de eenheid bevinden.

Een gele signaalsterkte geeft aan dat er geen sterke verbinding is met uw sensor en dat dit gerelateerd is aan uw positie. Probeer iets over het kussen te schuiven.

Een blauwe signaalsterktebalk geeft aan dat de eenheid storing van iets anders dan uw sensor opvangt. Zorg ervoor dat er zich geen metalen voorwerpen in de omgeving van de eenheid bevinden. Zie 7B in het vorige gedeelte voor een lijst met items die meestal Storing veroorzaken.

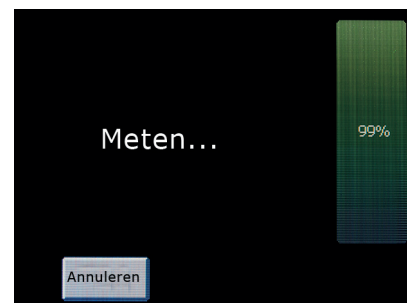

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat gebeurt er met mijn metingen?

Elke keer dat u een meting doet, wordt deze verzonden naar een beveiligde website waartoe uw medisch team toegang heeft. Uw arts of verpleegkundige bekijkt uw informatie regelmatig en neemt contact met u op als er wijzigingen in uw geneesmiddelen of behandelplan nodig zijn. Als u niets hoort van uw team voor hartfalen, betekent dit dat ze tevreden zijn met uw metingen.

Ik krijg een waarschuwing op het scherm. Wat moet ik doen?

Als u problemen ondervindt met het elektronische systeem voor de patiënt, raadpleegt u het gedeelte Problemen met het elektronische systeem voor de patiënt oplossen in de handleiding voor het patiëntensysteem. Als de problemen aanhouden, neemt u contact op met uw hartfalenteam.

Wat heb ik nodig voor de instelling van mijn WiFi™-netwerk?

Zoek en noteer uw WiFi-netwerknnaam en WiFi-wachtwoord voordat u de WiFi-verbinding op uw eenheid instelt. Als u de WiFi-netwerknnaam en WiFi-wachtwoord niet kunt vinden, neemt u contact op met uw internetprovider voor hulp.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Als u vragen hebt over het CardioMEMS™ HF-systeem, kunt u contact opnemen met uw klinische hartfalenteam.

Ik heb een vervangend elektronisch systeem voor de patiënt ontvangen. Hoe stel ik dit in?

Raadpleeg het gedeelte Een vervangend systeem instellen in de handleiding voor het patiëntensysteem. U hebt het zescijferige serienummer van de sensor nodig. Dit nummer staat op uw patiëntenidentificatiekaart. U kunt dit nummer ook opvragen bij uw hartfalenteam.

Kan ik reizen met mijn elektronisch systeem voor de patiënt?

Ja, u kunt met uw systeem op reis. Als u vliegt, voldoet de reistas aan de vereiste afmetingen voor handbagage. Als u de reistas wilt inchecken bij de ruimbagage, vertel de luchtvaartmaatschappij dan dat u medische apparatuur bij u draagt. De reistas wordt dan gratis ingecheckt. Raadpleeg het gedeelte over het opnieuw inpakken van het systeem in de handleiding voor het patiëntensysteem of neem contact op met uw hartfalenteam om het systeem opnieuw in te pakken.

Met wie kan ik contact opnemen als ik nog steeds problemen heb met mijn elektronische systeem voor de patiënt?

Als u problemen ondervindt bij het verkrijgen van een goede positie of de meting niet kunt voltooien nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, raadpleegt u het gedeelte Problemen met het elektronische systeem voor de patiënt oplossen van de handleiding voor het patiëntensysteem.

OPMERKINGEN

OPMERKINGEN

Abbott

The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, België, Tel: +32 2 774 68 11
Cardiovascular.abbott

Korte samenvatting: neem voorafgaand aan het gebruik van deze hulpmiddelen de gebruiksaanwijzing door voor een volledige lijst met indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke ongewenste voorvallen en richtlijnen voor gebruik.

Indicaties en toepassing: het CardioMEMS™ HF-systeem is bestemd voor het draadloos meten en bewaken van de longslagaderdruk (PA-druk) en de hartfrequentie bij patiënten met hartfalen die behoren tot Klasse III volgens de New York Heart Association (NYHA), en die het afgelopen jaar in het ziekenhuis zijn opgenomen wegens hartfalen. De hemodynamische gegevens worden door artsen gebruikt om hartfalen te beheren en om ziekenhuisopnamen wegens hartfalen te reduceren.

Contra-indicaties: het CardioMEMS HF-systeem is gecontra-indiceerd voor patiënten die geen antistollingsmedicatie kunnen innemen gedurende één maand na het implanteren.

Mogelijke bijwerkingen: mogelijke bijwerkingen die samenhangen met de implantatieprocedure zijn onder andere, maar niet beperkt tot de volgende: infectie, aritmie, bloeding, hematoom, trombus, hartinfarct, voorbijgaande ischemische aanval, beroerte, overlijden en embolisatie van het instrument.

Beperkingen: patiënten moeten hun eigen mobiele Apple®- of Android®-apparaat gebruiken om informatie te ontvangen en te verzenden naar de mobiele app myCardioMEMS™. Om dit te doen, moet het apparaat aan staan, de app zijn geïnstalleerd en datadekking (via mobiel netwerk of WiFi®) beschikbaar zijn. Met de app myCardioMEMS™ kunt u meldingen over aanpassingen en herinneringen aan medicatie ontvangen, laboratoriumresultaten opvragen en een bevestiging krijgen dat de PA-drukwaarden zijn ontvangen. Er zijn echter veel interne en externe factoren die het ophalen en verzenden van meldingen en patiëntinformatie, zoals bedoeld door de arts, kunnen belemmeren, vertragen of voorkomen. Deze factoren omvatten: omgeving van de patiënt, dataservices, het besturingssysteem en de instellingen van het mobiele apparaat, de klinische omgeving, wijzigingen in het doorgifteschema of de configuratie, of gegevensverwerking.

™ geeft een handelsmerk van de ondernemingsgroep Abbott aan.

Met + wordt een handelsmerk van derden aangegeven dat het eigendom is van de respectievelijke eigenaar.

© 2022 Abbott. Alle rechten voorbehouden.

MAT-2117379 v1.0 | Document uitsluitend goedgekeurd voor gebruik door EMEA.

